

Anhang A - Gebrauchsanweisungen

Artikel	Gebrauchsanweisung (Deutsch)
<p>Latex Untersuchungshandschuh, weiß, puderfrei (Artikel-Nr. 12236, 12237, 12238, 12201)</p>	<p>Untersuchungshandschuhe und Schutzhandschuhe aus Naturlatex (NR), zum einmaligen Gebrauch, puderfrei, unsteril. Beidseitig verwendbar. Konform mit den Richtlinien 93/42/EWG (CE – MP Klasse I) und 89/686/EWG (CE – PSA Kategorie III) sowie den Normen EN455, EN420:2003 und EN374:2003. Die Handschuhlänge (240mm +/- 5mm) ist für eine Verwendung bestimmt, bei der ein minimales Risiko für den Handgelenksbereich besteht. Vorsichtsmaßnahmen: Prüfen Sie vor der Verwendung die Handschuhe immer auf mögliche Schäden. Bei Beschädigung nicht verwenden. ACHTUNG: Dieses Produkt enthält Naturlatex, welches allergische Reaktionen hervorrufen kann. Bei Unverträglichkeit gegen diesen Stoff nicht verwenden. Transport/Lagerhinweise: Bei 10 °C bis 30 °C trocken und dunkel in der Originalverpackung lagern. Vor Hitze, Feuchtigkeit, starkem Licht und Ozon schützen. Entsorgungshinweise: Entsprechend der gültigen Vorschriften entsorgen. Durch chemische Substanzen verunreinigte Handschuhe müssen entsprechend der Vorschriften für die betreffenden Chemikalien entsorgt werden.</p>
<p>Latex Untersuchungshandschuh, weiß, puderfrei, 300mm lang (Artikel-Nr. 86116, 86117, 86118, 86119)</p>	<p>Untersuchungshandschuhe und Schutzhandschuhe aus Naturlatex (NR), zum einmaligen Gebrauch, puderfrei, unsteril. Beidseitig verwendbar. Konform mit den Richtlinien 93/42/EWG (CE – MP Klasse I) und 89/686/EWG (CE – PSA Kategorie III) sowie den Normen EN455, EN420:2003 und EN374:2003. Vorsichtsmaßnahmen: Prüfen Sie vor der Verwendung die Handschuhe immer auf mögliche Schäden. Bei Beschädigung nicht verwenden. ACHTUNG: Dieses Produkt enthält Naturlatex, welches allergische Reaktionen hervorrufen kann. Bei Unverträglichkeit gegen diesen Stoff nicht verwenden. Transport/Lagerhinweise: Bei 10 °C bis 30 °C trocken und dunkel in der Originalverpackung lagern. Vor Hitze, Feuchtigkeit, starkem Licht und Ozon schützen. Entsorgungshinweise: Entsprechend der gültigen Vorschriften entsorgen. Durch chemische Substanzen verunreinigte Handschuhe müssen entsprechend der Vorschriften für die betreffenden Chemikalien entsorgt werden.</p>
<p>Latex Untersuchungshandschuh, schwarz, puderfrei (Artikel-Nr. 10014, 10015, 10016, 10017) – 100er Box (Artikel-Nr. 86023, 86024, 86025) – 30er Box</p>	<p>Untersuchungshandschuhe und Schutzhandschuhe aus Naturlatex (NR), zum einmaligen Gebrauch, puderfrei, unsteril. Beidseitig verwendbar. Konform mit den Richtlinien 93/42/EWG (CE – MP Klasse I) und 89/686/EWG (CE – PSA Kategorie III) sowie den Normen EN455, EN420:2003 und EN374:2003. Die Handschuhlänge (240mm +/- 5mm) ist für eine Verwendung bestimmt, bei der ein minimales Risiko für den Handgelenksbereich besteht. Vorsichtsmaßnahmen: Prüfen Sie vor der Verwendung die Handschuhe immer auf mögliche Schäden. Bei Beschädigung nicht verwenden. ACHTUNG: Dieses Produkt enthält Naturlatex, welches allergische Reaktionen hervorrufen kann. Bei Unverträglichkeit gegen diesen Stoff nicht verwenden. Transport/Lagerhinweise: Bei 10 °C bis 30 °C trocken und dunkel in der Originalverpackung lagern. Vor Hitze, Feuchtigkeit, starkem Licht und Ozon schützen. Entsorgungshinweise: Entsprechend der gültigen Vorschriften entsorgen. Durch chemische Substanzen verunreinigte Handschuhe müssen entsprechend der Vorschriften für die betreffenden Chemikalien entsorgt werden.</p>
<p>Latex Untersuchungshandschuh, blau, puderfrei (Artikel-Nr. 12254, 12255, 12257, 12258)</p>	<p>Untersuchungshandschuhe und Schutzhandschuhe aus Naturlatex (NR), zum einmaligen Gebrauch, puderfrei, unsteril. Beidseitig verwendbar. Konform mit den Richtlinien 93/42/EWG (CE – MP Klasse I) und 89/686/EWG (CE – PSA Kategorie III) sowie den Normen EN455, EN420:2003 und EN374:2003. Die Handschuhlänge (240mm +/- 5mm) ist für eine Verwendung bestimmt, bei der ein minimales Risiko für den Handgelenksbereich besteht. Vorsichtsmaßnahmen: Prüfen Sie vor der Verwendung die Handschuhe immer auf mögliche Schäden. Bei Beschädigung nicht verwenden. ACHTUNG: Dieses Produkt enthält Naturlatex, welches allergische Reaktionen hervorrufen kann. Bei Unverträglichkeit gegen diesen Stoff nicht verwenden. Transport/Lagerhinweise: Bei 10 °C bis 30 °C trocken und dunkel in der Originalverpackung lagern. Vor Hitze, Feuchtigkeit, starkem Licht und Ozon schützen. Entsorgungshinweise: Entsprechend der gültigen Vorschriften entsorgen. Durch chemische Substanzen verunreinigte Handschuhe müssen entsprechend der Vorschriften für die betreffenden Chemikalien entsorgt werden.</p>

<p>Latex Untersuchungshandschuh, weiß, gepudert (Artikel-Nr. 12228, 12229, 12230, 12231)</p>	<p>Untersuchungshandschuhe und Schutzhandschuhe aus Naturlatex (NR), zum einmaligen Gebrauch, puderfrei, unsteril. Beidseitig verwendbar. Konform mit den Richtlinien 93/42/EWG (CE – MP Klasse I) und 89/686/EWG (CE – PSA Kategorie III) sowie den Normen EN455, EN420:2003 und EN374:2003. Die Handschuhlänge (240mm +/- 5mm) ist für eine Verwendung bestimmt, bei der ein minimales Risiko für den Handgelenksbereich besteht. Vorsichtsmaßnahmen: Prüfen Sie vor der Verwendung die Handschuhe immer auf mögliche Schäden. Bei Beschädigung nicht verwenden. ACHTUNG: Dieses Produkt enthält Naturlatex, welches allergische Reaktionen hervorrufen kann. Bei Unverträglichkeit gegen diesen Stoff nicht verwenden. Transport/Lagerhinweise: Bei 10 °C bis 30 °C trocken und dunkel in der Originalverpackung lagern. Vor Hitze, Feuchtigkeit, starkem Licht und Ozon schützen. Entsorgungshinweise: Entsprechend der gültigen Vorschriften entsorgen. Durch chemische Substanzen verunreinigte Handschuhe müssen entsprechend der Vorschriften für die betreffenden Chemikalien entsorgt werden.</p>
<p>Nitril Untersuchungshandschuh, weiß, puderfrei (Artikel-Nr. 12235, 12239, 12240, 12241)</p>	<p>Untersuchungshandschuhe und Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk (NBR) zum einmaligen Gebrauch, puderfrei, unsteril. Beidseitig verwendbar. Konform mit den Richtlinien 93/42/EWG (CE Klasse I) und 89/686/EWG (CE Kategorie III) sowie den Normen EN455, EN420:2003 und EN374:2003. Die Handschuhlänge (240mm +/- 5mm) ist für eine Verwendung bestimmt, bei der ein minimales Risiko für den Handgelenksbereich besteht. Vorsichtsmaßnahmen: Prüfen Sie vor der Verwendung die Handschuhe immer auf mögliche Schäden. Bei Beschädigung nicht verwenden. ACHTUNG: Dieses Produkt enthält Dithiocarbamat. Bei Unverträglichkeit gegen diesen Stoff nicht verwenden. Frei von Naturlatex. Transport/Lagerhinweise: Bei 10 °C bis 30 °C trocken und dunkel in der Originalverpackung lagern. Vor Hitze, Feuchtigkeit, starkem Licht und Ozon schützen. Entsorgungshinweise: Entsprechend der gültigen Vorschriften entsorgen. Durch chemische Substanzen verunreinigte Handschuhe müssen entsprechend der Vorschriften für die betreffenden Chemikalien entsorgt werden.</p>
<p>Nitril Untersuchungshandschuh, blau, puderfrei (Artikel-Nr. 12267, 12282, 12283, 12284)</p>	<p>Untersuchungshandschuhe und Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk (NBR) zum einmaligen Gebrauch, puderfrei, unsteril. Beidseitig verwendbar. Konform mit den Richtlinien 93/42/EWG (CE Klasse I) und 89/686/EWG (CE Kategorie III) sowie den Normen EN455, EN420:2003 und EN374:2003. Die Handschuhlänge (240mm +/- 5mm) ist für eine Verwendung bestimmt, bei der ein minimales Risiko für den Handgelenksbereich besteht. Vorsichtsmaßnahmen: Prüfen Sie vor der Verwendung die Handschuhe immer auf mögliche Schäden. Bei Beschädigung nicht verwenden. ACHTUNG: Dieses Produkt enthält Dithiocarbamat. Bei Unverträglichkeit gegen diesen Stoff nicht verwenden. Frei von Naturlatex. Transport/Lagerhinweise: Bei 10 °C bis 30 °C trocken und dunkel in der Originalverpackung lagern. Vor Hitze, Feuchtigkeit, starkem Licht und Ozon schützen. Entsorgungshinweise: Entsprechend der gültigen Vorschriften entsorgen. Durch chemische Substanzen verunreinigte Handschuhe müssen entsprechend der Vorschriften für die betreffenden Chemikalien entsorgt werden.</p>
<p>Nitril Untersuchungshandschuh, schwarz, puderfrei (Artikel-Nr. 82599, 82600, 82601, 82602)</p>	<p>Untersuchungshandschuhe und Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk (NBR) zum einmaligen Gebrauch, puderfrei, unsteril. Beidseitig verwendbar. Konform mit den Richtlinien 93/42/EWG (CE Klasse I) und 89/686/EWG (CE Kategorie III) sowie den Normen EN455, EN420:2003 und EN374:2003. Die Handschuhlänge (240mm +/- 5mm) ist für eine Verwendung bestimmt, bei der ein minimales Risiko für den Handgelenksbereich besteht. Vorsichtsmaßnahmen: Prüfen Sie vor der Verwendung die Handschuhe immer auf mögliche Schäden. Bei Beschädigung nicht verwenden. ACHTUNG: Dieses Produkt enthält Dithiocarbamat. Bei Unverträglichkeit gegen diesen Stoff nicht verwenden. Frei von Naturlatex. Transport/Lagerhinweise: Bei 10 °C bis 30 °C trocken und dunkel in der Originalverpackung lagern. Vor Hitze, Feuchtigkeit, starkem Licht und Ozon schützen. Entsorgungshinweise: Entsprechend der gültigen Vorschriften entsorgen. Durch chemische Substanzen verunreinigte Handschuhe müssen entsprechend der Vorschriften für die betreffenden Chemikalien entsorgt werden.</p>
<p>Nitril Untersuchungshandschuh, blau, puderfrei, 300mm lang (Artikel-Nr. 86120, 86121, 86122, 86123)</p>	<p>Untersuchungshandschuhe und Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk (NBR) zum einmaligen Gebrauch, puderfrei, unsteril. Beidseitig verwendbar. Konform mit den Richtlinien 93/42/EWG (CE Klasse I) und 89/686/EWG (CE Kategorie III) sowie den Normen EN455, EN420:2003 und EN374:2003. Vorsichtsmaßnahmen: Prüfen Sie vor der Verwendung die Handschuhe immer auf mögliche Schäden. Bei Beschädigung nicht verwenden. ACHTUNG: Dieses Produkt enthält Dithiocarbamat. Bei Unverträglichkeit gegen diesen Stoff nicht verwenden. Frei von Naturlatex. Transport/Lagerhinweise: Bei 10 °C bis 30 °C trocken und dunkel in der Originalverpackung lagern. Vor Hitze, Feuchtigkeit, starkem Licht und Ozon schützen. Entsorgungshinweise: Entsprechend der gültigen Vorschriften entsorgen. Durch chemische Substanzen verunreinigte Handschuhe müssen entsprechend der Vorschriften für die betreffenden Chemikalien entsorgt werden.</p>

<p>Nitril Untersuchungshandschuh, lavendel, puderfrei (Artikel-Nr. 82347, 82348, 82349, 82350) – 50er VE</p>	<p>Untersuchungshandschuhe und Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk (NBR) zum einmaligen Gebrauch, puderfrei, unsteril. Beidseitig verwendbar. Konform mit den Richtlinien 93/42/EWG (CE Klasse I) und 89/686/EWG (CE Kategorie III) sowie den Normen EN455, EN420:2003 und EN374:2003. Die Handschuhlänge (240mm +/- 5mm) ist für eine Verwendung bestimmt, bei der ein minimales Risiko für den Handgelenksbereich besteht. Vorsichtsmaßnahmen: Prüfen Sie vor der Verwendung die Handschuhe immer auf mögliche Schäden. Bei Beschädigung nicht verwenden. ACHTUNG: Dieses Produkt enthält Dithiocarbamat. Bei Unverträglichkeit gegen diesen Stoff nicht verwenden. Frei von Naturlatex. Transport/Lagerhinweise: Bei 10 °C bis 30 °C trocken und dunkel in der Originalverpackung lagern. Vor Hitze, Feuchtigkeit, starkem Licht und Ozon schützen. Entsorgungshinweise: Entsprechend der gültigen Vorschriften entsorgen. Durch chemische Substanzen verunreinigte Handschuhe müssen entsprechend der Vorschriften für die betreffenden Chemikalien entsorgt werden.</p>
<p>Nitril Einweghandschuh, weiß, puderfrei *Starpack* (Artikel-Nr. 90246, 90247, 90248, 90249)</p>	<p>Einmalhandschuh aus Nitrilkautschuk (NBR) zum einmaligen Gebrauch, puderfrei, unsteril. Beidseitig verwendbar. Konform mit der 89/686/EWG (CE Kategorie I – Gegen minimale Risiken) und der Norm EN420:2003. Die Handschuhlänge (240mm +/- 5mm) ist für eine Verwendung bestimmt, bei der ein minimales Risiko für den Handgelenksbereich besteht. Vorsichtsmaßnahmen: Prüfen Sie vor der Verwendung die Handschuhe immer auf mögliche Schäden. Bei Beschädigung nicht verwenden. ACHTUNG: Dieses Produkt enthält Dithiocarbamat. Bei Unverträglichkeit gegen diesen Stoff nicht verwenden. Frei von Naturlatex. Nicht bei chemischen Gefahren einsetzen. Transport/Lagerhinweise: Bei 10 °C bis 30 °C trocken und dunkel in der Originalverpackung lagern. Vor Hitze, Feuchtigkeit, starkem Licht und Ozon schützen. Entsorgungshinweise: Entsprechend der gültigen Vorschriften entsorgen.</p>
<p>Nitril Einweghandschuh, blau, puderfrei *FoodProfi* (Artikel-Nr. 82854, 82855, 82856, 82857)</p>	<p>Einmalhandschuh aus Nitrilkautschuk (NBR) zum einmaligen Gebrauch, puderfrei, unsteril. Beidseitig verwendbar. Konform mit der 89/686/EWG (CE Kategorie I – Gegen minimale Risiken) und der Norm EN420:2003. Die Handschuhlänge (240mm +/- 5mm) ist für eine Verwendung bestimmt, bei der ein minimales Risiko für den Handgelenksbereich besteht. Vorsichtsmaßnahmen: Prüfen Sie vor der Verwendung die Handschuhe immer auf mögliche Schäden. Bei Beschädigung nicht verwenden. ACHTUNG: Dieses Produkt enthält Dithiocarbamat. Bei Unverträglichkeit gegen diesen Stoff nicht verwenden. Frei von Naturlatex. Nicht bei chemischen Gefahren einsetzen. Transport/Lagerhinweise: Bei 10 °C bis 30 °C trocken und dunkel in der Originalverpackung lagern. Vor Hitze, Feuchtigkeit, starkem Licht und Ozon schützen. Entsorgungshinweise: Entsprechend der gültigen Vorschriften entsorgen.</p>
<p>Vinyl Untersuchungshandschuh, transparent, puderfrei (Artikel-Nr. 12232, 12233, 12234, 12242)</p>	<p>Untersuchungshandschuhe aus Polyvinylchlorid (PVC) zum einmaligen Gebrauch, puderfrei, unsteril. Beidseitig verwendbar. Konform mit den Richtlinien 93/42/EWG (CE Klasse I) und 89/686/EWG (CE Kategorie I – Gegen minimale Risiken) sowie den Normen EN455 und EN420:2003. Die Handschuhlänge (240mm +/- 5mm) ist für eine Verwendung bestimmt, bei der ein minimales Risiko für den Handgelenksbereich besteht. Vorsichtsmaßnahmen: Prüfen Sie vor der Verwendung die Handschuhe immer auf mögliche Schäden. Bei Beschädigung nicht verwenden. ACHTUNG: Dieses Produkt enthält Phthalate. Bei Unverträglichkeit gegen diesen Stoff nicht verwenden. Frei von Naturlatex. Nicht bei chemischen Gefahren einsetzen. Transport/Lagerhinweise: Bei 10 °C bis 30 °C trocken und dunkel in der Originalverpackung lagern. Vor Hitze, Feuchtigkeit, starkem Licht und Ozon schützen. Entsorgungshinweise: Entsprechend der gültigen Vorschriften entsorgen.</p>
<p>Vinyl Untersuchungshandschuh, transparent, gepudert (Artikel-Nr. 12224, 12225, 12226, 12227)</p>	<p>Untersuchungshandschuhe aus Polyvinylchlorid (PVC) zum einmaligen Gebrauch, puderfrei, unsteril. Beidseitig verwendbar. Konform mit den Richtlinien 93/42/EWG (CE Klasse I) und 89/686/EWG (CE Kategorie I – Gegen minimale Risiken) sowie den Normen EN455 und EN420:2003. Die Handschuhlänge (240mm +/- 5mm) ist für eine Verwendung bestimmt, bei der ein minimales Risiko für den Handgelenksbereich besteht. Vorsichtsmaßnahmen: Prüfen Sie vor der Verwendung die Handschuhe immer auf mögliche Schäden. Bei Beschädigung nicht verwenden. ACHTUNG: Dieses Produkt enthält Phthalate. Bei Unverträglichkeit gegen diesen Stoff nicht verwenden. Frei von Naturlatex. Nicht bei chemischen Gefahren einsetzen. Transport/Lagerhinweise: Bei 10 °C bis 30 °C trocken und dunkel in der Originalverpackung lagern. Vor Hitze, Feuchtigkeit, starkem Licht und Ozon schützen. Entsorgungshinweise: Entsprechend der gültigen Vorschriften entsorgen.</p>